



- Инструменты для имплантологии
- Implantologie
- Implantologie

- Инструменти для імплантології
- Implantologia
- زراعة الأسنان

Ideal for Chairside Preparation of Autogenous Bone Grafts  
Bone Morselizer Bone Morselizer  
Ідеально підходить для стоматологічного приготування  
аутогенного кісткового трансплантату Кістковий  
подрібнювач

30-465 Bone morselizer  
Кістковий подрібнювач



1. Adjust the spacing screw (located at the hinge of the handles) to the desired spacing requirements between knurled surfaces.

Відрегулюйте розпірний гвинт (знаходиться на стержні ручок) до необхідної відстані між поверхнями з насчками.

Manual Bone Mill, Holding & Drilling Forceps  
Ручний кістковий млин, затискний та буровий пінцет



### BONE MORSELER

The Bone Morselizer is a hand instrument which helps in the crushing of bone material.

Follow these steps to prepare properly crushed bone:

### КІСТКОВИЙ ПОДРІБНЮВАЧ

Кістковий подрібнювач – це ручний інструмент, який допомагає дробити кістковий матеріал. Дотримуйтесь наступних кроків у приготуванні належним чином подрібненої кістки.



2. Place the bone material into the bone well.

Помістіть кістковий матеріал у лунку для кісток.



3. Compress handles together in order to create pressure on the bone material.

Стисніть ручки щоб створити тиск на кістковий матеріал.



4. Turn the bone morselizer clockwise as the handles are squeezed. Always maintain a slight space between the two knurled surfaces, by using the spacing screw.

Поверніть кістковий подрібнювач за годинниковою стрілкою, коли ручки будуть стиснені. Завжди зберігайте невеликий простір між двома поверхнями з насчками, використовуючи розпірний гвинт.



5. To remove bone, press the T-handle and bone will express from the bone well.

Щоб видалити кістку, натисніть на ручку у формі літери «Т» і кістка випаде з лунки для кісток.



30-466

EASY Bone Manual  
Bone Mill to chop Bone  
Fragments

EASY BONE Ручний кістковий  
млин для розбивання кісткових відламків



30-467

Bone Mill  
Кістковий млин



30-468

Basins For Bone  
Mills